

POKYNY K ODBĚRU



PRO SPRÁVNÝ VÝSLEDEK TESTU...

...nejezte, nepijte, nežvýkejte žvýkačku a nekuřte 10 minut před odběrem.



1

Cílem je odebrat zadní sliny/hleny do odběrové zkumavky, na kterou nejprve našroubujte přiložený trychtýřek.



2




Důležité: Několikrát zakašlejte do roušky.

3


V ústech nashromážděte větší množství slin a několikrát je poválejte zepředu dozadu.

4

Přiložte trychtýřek ke rtům a plivejte dokud ve zkumavce nebude alespoň 1 cm tekuté části slin (tekutina bez pěny).

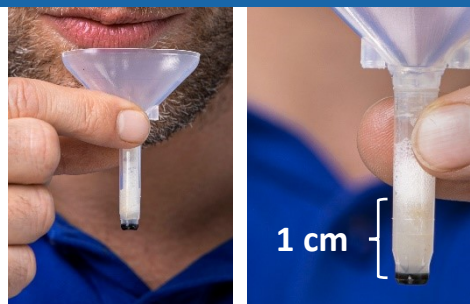

5

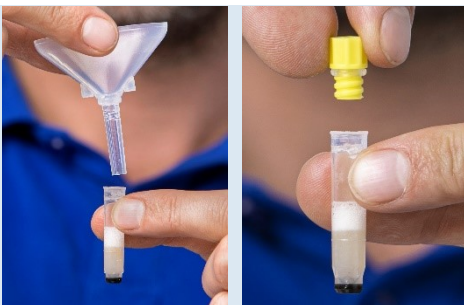

Odšroubujte trychtýřek a zahodte jej. Zkumavku pečlivě zašroubujte víčkem (jeho barva se může lišit od fotografie).

6

Zkumavku otřete dezinfekčním ubrouskem a odevzdejte.



Upozornění: Přesto, že odběrová sada je vyrobena ze zdravotně nezávadného polypropylenu, její součásti neolizujte ani nežvýkejte.

POKYNY PRO ODBĚROVÉ MÍSTO

DB-1221 Saliva Collection Set 1.1IM

Kat. č.: DB-1221-1.1IM-1set (1 sada)

Kat. č.: DB-1221-1.1IM-100sets (100 sad)

Kat. č.: DB-1221-1.1IM-200sets (200 sad)

Kat. č.: DB-1221-1.1IM-500sets (500 sad)

DB-1230 Saliva Collection Set 1.4IF

Kat. č.: DB-1230-1.4IF-1set (1 sada)

Kat. č.: DB-1230-1.4IF-200sets (100 sad)

Kat. č.: DB-1230-1.4IF-100sets (200 sad)

Kat. č.: DB-1230-1.4IF-500sets (500 sad)

DB-1225 Saliva Collection Set 1.4IM

Kat. č.: DB-1225-1.4IM-1set (1 sada)

Kat. č.: DB-1225-1.4IM-100sets (100 sad)

Kat. č.: DB-1225-1.4IM-200sets (200 sad)

Kat. č.: DB-1225-1.4IM-500sets (500 sad)



Tato odběrová sada slouží k odběru slin pro vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 viru:

- ❖ Testovanou osobu je nutné poučit o průběhu odběru, dle návodu na druhé straně.
- ❖ Pro diagnostikování nemoci je důležité, aby testovaná osoba před odběrem zakašlala.
- ❖ Po odběru zkontrolujte, že je hladina tekuté části slin (bez pěny) dostatečně vysoká:
 - ❖ hladina musí dosahovat výšky alespoň 1 cm nad tmavým dnem zkumavky,
 - ❖ v případě nedostatečného množství slin je potřeba odběr opakovat.
- ❖ Před uložením zkumavky pro transport zkontrolujte, že je víčko zkumavky řádně dotažené.

Skladování vzorků a transport:

- ❖ Tyto odběrové sady jsou doporučeny pro použití spolu s DB-1219 DBdirect™ COVID-19 Multiplex RT-PCR Kit; při jejím použití je možné zkumavku se slinami skladovat až 72 hodin při teplotách 4°C až 25°C bez ztráty citlivosti detekce, doporučené skladování je při teplotě 25°C.
- ❖ Při použití jiné detekční sady či detekci jiných analytů je nutné stabilitu těchto analytů ve slinách ověřit.
- ❖ Pro snadnější zpracování doporučujeme odběrové sady skládat do stojánků:
 - ❖ DB-1227 – Sample Rack 1.1IM (lze použít pro DB-1221)
 - ❖ DB-1228 – Sample Rack 1.4IM (lze použít pro DB-1225 a DB-1230)

Identifikace vzorku (skenování):

- ❖ Pro jednoduchou identifikaci vzorků má každá zkumavka na spodní straně 2D matrix kód, díky kterému můžete přímo na odběrovém místě vzorek spárovat s informacemi o testované osobě.

Se sadou doporučujeme používat jednorázové dezinfekční ubrousky určené k dezinfekci zkumavky a rukou testované osoby po odběru (předtím, než testovaná osoba odevzdá odběrovou zkumavku se slinami personálu odběrového místa).

Příbalový leták a uživatelská příručka pro DB-1221 Saliva Collection Set 1.1IM;
DB-1225 Saliva Collection Set 1.4IM; DB-1230 Saliva Collection Set 1.4IF

Verze DB-1221(1225,1230)-001-201211 CZ | Revize 1.4 CZ | Poslední aktualizace: 6.2.2021



DIANA Biotechnologies s.r.o., Nad Safinou II 366, 25250 Vestec, Česká republika
Email: support@dianabiotech.com, Web: www.dianabiotech.com