

# POKYNY K ODBĚRU

## PRO SPRÁVNÝ VÝSLEDEK TESTU...

...nejezte, nepijte, nežvýkejte žvýkačku a  
nekuřte 10 minut před odběrem.



Cílem je odebrat sliny do odběrové zkumavky.

1

Otevřete odběrovou sadu a našroubujte  
přiložený trychtýřek na odběrovou zkumavku.



2



Důležité: Několikrát zakašlejte do roušky.

3


V ústech nashromážděte větší množství slin a  
několikrát je poválejte zepředu dozadu.

4

Přiložte trychtýřek ke rtům a sliny do  
něj volně vypusťte. Je potřeba odebrat  
alespoň 1 cm tekuté části slin.




5

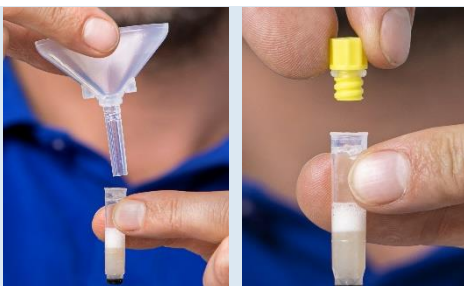

Odšroubujte trychtýřek a vyhoďte jej do  
odpadu. **Zkumavku poté důkladně  
zašroubujte víčkem.**

6

Zkumavku otřete dezinfekčním  
ubrouskem a odevzdejte.

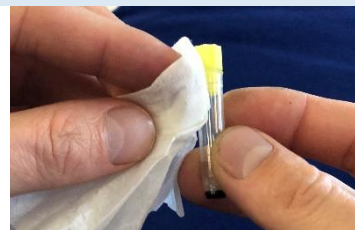

# POKYNY PRO ODBĚROVÉ MÍSTO

<b>DB-1225 Saliva Collection Set 1.41M</b>	<b>DB-1230 Saliva Collection Set 1.41F</b>
<b>Kat. č.: DB-1225-1.41M-100sets (100 sad)</b>	<b>Kat. č.: DB-1230-1.41F-200sets (100 sad)</b>
<b>Kat. č.: DB-1225-1.41M-200sets (200 sad)</b>	<b>Kat. č.: DB-1230-1.41F-100sets (200 sad)</b>
<b>Kat. č.: DB-1225-1.41M-500sets (500 sad)</b>	<b>Kat. č.: DB-1230-1.41F-500sets (500 sad)</b>

Každá odběrová sada se skládá z odběrové zkumavky, trychtýřku a šroubovacího víčka.

**Určený účel:** Odběrová sada je určena k odběru, transportu a uchovávání biologických vzorků, zejména slin, sčěrů, tekutin (aspirátů) a výplachů.

## Postup odběru slin či jiných biologických vzorků:

- ❖ Testovaná osoba musí být před odběrem seznámena s průběhem odběru vzorku, viz návod na druhé straně.
- ❖ Pro správné provedení odběr slin pro stanovení respiračních onemocnění je důležité, aby testovaná osoba před odběrem zakašlala.
- ❖ Po odběru zkontrolujte, že je hladina tekuté části vzorku (sliny bez pěny, aspiráty či výplachy) dostatečně vysoká:
  - ❖ hladina musí dosahovat výšky alespoň 1 cm nad tmavým dnem zkumavky, což odpovídá objemu 0,2 ml.
  - ❖ v případě nedostatečného množství vzorku je potřeba odběr opakovat.
  - ❖ u vzorků získaných pomocí sčěrů je do odběrové zkumavky vložena výtěrová tyčinka s odebraným vzorkem a zkumavka uzavřena. Koncová část tyčinky může být v případě potřeby zkrácena.
- ❖ Před uložením zkumavky pro transport zkontrolujte, že je víčko zkumavky řádně dotaženo.
- ❖ Při každé manipulaci se zkumavkami je doporučeno používat ochranné rukavice a případně si vždy vydezinfikovat ruce.

## Skladování prázdných sad, vzorků a transport:

- ❖ Před použitím odběrové sady skladujte v rozmezí teplot 2 - 30 °C.
  - ❖ Po rozbalení odběrové sady proveďte ihned odběr vzorku a zkumavku následně důkladně zašroubujte, aby se předešlo kontaminaci okolního prostředí.
  - ❖ Zkumavku s odebranými slinami lze skladovat až 72 hodin při teplotách 4 °C až 25 °C v temném prostředí. Jiné typy vzorků lze skladovat až 24 hodin při teplotách 4 - 8 °C.
  - ❖ Pro snadnější zpracování doporučujeme odběrové sady DB-1225 skládat do stojánku DB-1228 – Sample Rack 1.41M. V případě sad DB-1230 lze obdobně využít stojánky DB-1240 – Sample Rack 1.41F.
- ## Identifikace vzorku (skenování):
- ❖ Pro jednoduchou identifikaci vzorků má každá zkumavka na spodní straně 2D matrix kód, díky kterému můžete přímo na odběrovém místě vzorek spárovat s informacemi o testované osobě.
- Se sadou doporučujeme používat jednořázkové dezinfekční ubrousky určené k dezinfekci zkumavky a rukou testované osoby po odběru (předtím, než testovaná osoba odevzdá odběrovou zkumavku se slinami personálu odběrového místa).

Příbalový leták a uživatelská příručka pro DB-1225 Saliva Collection Set 1.41M; DB-1230 Saliva Collection Set 1.41F

Verze DB-1225(1230)-001-201211 CZ | Revize 1.8 CZ | Poslední aktualizace: 20.9.2022

DIANA Biotechnologies s. r. o., Nad Safinou II 366, 25250 Vestec, Česká republika

Email: [support@dianabiotech.com](mailto:support@dianabiotech.com), Web: [www.dianabiotech.com](http://www.dianabiotech.com)

## Výstrahy a upozornění:

- ❖ Prostředek je určen k jednorázovému použití, nikdy nelze použít opakovaně.
- ❖ Vyarujte se zbytečné manipulaci se vzorky, mohou být potenciálně infekční.
- ❖ Odběrová sada je vyrobena z polypropylenu, její součástí neolizujte ani nežvýkejte, ve výjimečných případech může dojít k alergické reakci na plastový materiál.
- ❖ Sada obsahuje malé části, které by mohly být vdechnuty. Držte je mimo dosah dětí.
- ❖ Nepoužívejte, pokud je kterákoliv část prostředku nalomená, zřetelně špinavá, či chybí.
- ❖ Obalový materiál zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- ❖ Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda (tedy taková při níž došlo k dočasnému závažnému nebo trvalému zhoršení zdravotního stavu či smrti pacienta, uživatele či jiné osoby, nebo taková kdy došlo k závažnému ohrožení veřejného zdraví), ke které došlo v souvislosti s použitím tohoto prostředku, musí být hlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu (pro ČR SÚKL).
- ❖ Trychtýřek sloužící k usnadnění odběru může obsahovat infekční sliny či jiné biologické vzorky, po použití jej proto vhodte do nádoby na infekční odpad.



Manufacturer / Výrobce



In vitro diagnostic medical device / Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro



CE marking / Prostředek označený CE značkou



Lot number / Číslo šarže



Operator's manual, operating instruction / Čtěte návod k použití



Catalog number / Katalogové číslo



Temperature limit / Limit teploty



Do not use if package is damaged / Nepoužívat, jestliže je balení poškozeno



Use by date / Použit do data



Do not reuse / Nepoužívat opakovaně



Package contains / Balení obsahuje

